

SCHNELLSTART FOODSensor IgG

Test auf Nahrungsmittel-Unverträglichkeiten (IgG 1, 2, 3, 4, Verzögerter Typ)

- 1 Patienteninformationen anfordern** und für den Patienten **bereitlegen**
- 2 Test anwenden u.a. bei folgenden Symptomen:**

 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Durchfälle ▶ Reizdarm ▶ Magenschmerzen ▶ Blähungen ▶ Völlegefühl 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Chronischer Kopfschmerz ▶ Migräne ▶ Aufmerksamkeitsprobleme (ADHS) 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Neurodermitis ▶ Schuppenflechte ▶ Hautekzeme 	 <ul style="list-style-type: none"> ▶ Gewichtsprobleme (Abnehmen, Zunehmen)
--	--	---	---

3 Durchführung

Ausschlusskriterium: Hohes Fieber, bei Cortisonbehandlung und Interferontherapie bitte Rücksprache

Testvariante wählen	Wählen Sie aus verschiedenen Profilen bis zu 280 Nahrungsmittel in unterschiedlichen Varianten.
Ausfüllen	Anforderungsschein mit gewünschter Rechnungsart und erforderlichen Unterschriften, Anamnesedaten
Blut	venöses Blut entnehmen, 7 - 9 ml, gekühlt bis zum Versand lagern
Einsenden	Blut mit Anforderungsschein an das Labor
Befund	kommt ca. 5 - 10 Werktage nach Probeneingang per Post in Ihre Praxis, elektronisch vorab möglich

4 Unterstützung bei der Ernährungsumstellung der Patienten und Optimierung der Therapie

- ▶ 140-seitiges ausführliches **Patientenhandbuch**
- ▶ **FOODSensor-App** begleitet die Wiedereinführung von Nahrungsmitteln und liefert aktualisierte Rezepte
- ▶ Kostenfreie **Patienten-Hotline**
- ▶ Online **Patienten-Portal** mein.food-sensor.de
- ▶ **Therapieoptimierung:** Fordern Sie nach dem Testergebnis weitere Allergene je nach Befundlage an.



Ihr Ansprechpartner für Fragen zu Einsendung und Befund

Labor	 0251 - 208 358 60  info@food-sensor.de
--------------	---